

[주의사항]

BEO® Care Gel

1. 눈이나 점막부위에 접촉하지 않도록 한다.
2. 의사의 권고 없이 다른 피부염 치료에 사용하지 않는다.
3. 본 제품은 완전히 건조시키지 않으면 옷에 얼룩이 생기게 할 수 있다.
4. 외용 (피부에 바르는 용도)으로만 사용한다.
5. 아이의 손이 닿지 않도록 주의하며 제품은 실온에 보관한다.
6. 튜브에 기재된 유효기간이 경과하면 사용하지 않는다.

BEO® Care Stick

1. 3도 이상의 화상이나 개방성 상처부위에 사용하지 않는다.
2. 눈이나 점막부위에 접촉하지 않도록 한다.
3. 의사의 권고 없이 다른 피부염 치료에 사용하지 않는다.
4. 본 제품은 완전히 건조시키지 않으면 옷에 얼룩이 생기게 할 수 있다.
5. 외용(피부에 바르는 용도)으로만 사용한다.
6. 소아의 손이 닿지 않도록 주의하며 제품은 실온에 보관한다.
7. 용기에 기재된 유효기간이 경과하면 사용하지 않는다.

[이상반응]

드물게 피부 발진, 동통 또는 자극감이 일어날 수 있다.
이런 또는 다른 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사와 상의하십시오.

[보관 시 주의사항]

1. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
2. 열을 피하여 보관한다.

점착성 창상 피복재

의료가기

BEO Care Gel

BEO Care Stick

제품명	BEO® Care Gel & Stick	제조번호 및 사용기한	별도 표기
품목명	점착성 투명 창상피복재		
의료기기 분류	의료기기 (2등급)		
제조인증번호	[BEO® Care Gel] 제인 26-4513 호 [BEO® Care Stick] 제인 26-4609 호		
모델명	[BEO® Care Gel] BTK-15 [BEO® Care Stick] BTK-S13		
제조의료자	(주)비티케이(BTK) 경기도 성남시 분당구 장안로 37, 5층 (분당동, BTK 빌딩)		
제조자	(주)이노트 경기도 의왕시 이미로 40 B동 504호, 505호 (포일동, 인덕원IT 밸리)		
판매자	(주)메이븐스 부산광역시 부산진구 성지곡로 27-3(초읍동) http://mavens.kr Tel. 051-465-5800		

남겨진 흔적을 지우는.

흉터 관리 솔루션

흉터 관리 솔루션



의료기기

BEO® Care
Gel & Stick

Care for Happiness

점착성 투명 창상피복재



“ 남겨진 흔적을 지우는. 흉터 관리 솔루션 ”

피부회복과정 (Wound Healing)

1. Traumatic




상처가 생기고
회복을 시작해요.

2. Suture




상처가 닫히고
아물기 시작해요.

3. Regeneration

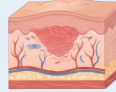

피부 조직이
새롭게 재생돼요.

4. Scar Care

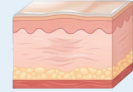

베오케어젤로
매끄럽게 완성됩니다.

흉터 부위에 매끄러운 투명 보호막을 형성하여 켈로이드성 및 비대성 흉터를 효과적으로 관리해주는 점착성 투명 창상피복재입니다.

BEO® Care Gel 이란? 15 g

본 제품은 개방된 창상 부위가 아닌 화상, 일반적인 수술, 외상 등으로 생긴 비후된 흉터와 켈로이드 흉터 관리에 도움을 주기 위해 흉터 부위에 도포하여 사용하는 투명한 실리콘겔이며, 도포 시 얇은 막을 형성하여 흉터와 아문상처를 보호합니다.



용도 및 특징점

넓은 부위의 아문 상처를
부드럽게 마사지하듯 도포하여 집중 관리합니다.



손상된 피부 케어

손상된 부위에 부드럽게 밀착되어 건강한 피부 회복을 돕습니다.



소량 사용 & 투명 밀착 제형

소량으로도 얇고 맑게 밀착되어 티 나지 않게 관리할 수 있습니다.



다양한 원인의 흉터 집중 관리

화상, 수술 등 오래되거나 새로 생긴 흉터를 효과적으로 케어합니다.

사용방법

STEP 01

STEP 02

STEP 03



세척 후 건조



소량 취해 마사지
BEO® Care Gel



부드럽게 도포
BEO® Care Stick



3~4분 건조
과량은 티슈 제거

BEO® Care Stick 이란? 13 g

본 제품은 오래되거나 새로 생긴 피부흉터 및 탄살 관리를 위해서 사용되는 점착성 투명 필름상 창상피복재로서 **환자가 탄살 때문에 가렵거나 불편함을 느끼는 데에 도움을 주고 탄살로 인한 변색을 완화하고 피부증상을 개선**합니다.



용도 및 특징점

굴곡지거나 움직임이 많은 부위에 뛰어난 보호막을 형성해주며,
뛰어난 휴대성으로 언제 어디서나 간편하게 케어합니다.



굴곡진 부위 밀착 케어

굴곡진 신체 부위에도 들뜸 없이 부드럽게 밀착되어
꼼꼼하게 케어합니다.



피부 장벽 강화 및 탄살 케어

튼튼한 보호막을 형성하여 건조함으로 인한 탄살을
예방하고 관리합니다.

24

간편한 휴대 & 산뜻한 사용감

손에 묻지 않는 스틱 타입으로
언제 어디서나 끈적임 없이 깔끔하게 바를 수 있습니다.

점착성 창상 피복재

의료기기

BEO Care Gel

BEO Care Stick

남겨진 흔적을 지우는.
흉터 관리 솔루션
흉터 관리 솔루션

